

---

# MANUAL DO USUÁRIO



 **freedom**  
**Almofada Ergonômica**

## INSTRUÇÕES

1. Após retirar a almofada da caixa, abra a válvula autoinflável, girando-a no sentido horário para inflá-la até que a pressão máxima seja atingida (ver Figura 1, itens A e B). Sempre que for realizar este procedimento, o usuário não pode estar sentado na almofada.
2. Feche a válvula, girando-a no sentido anti-horário até que esteja alinhada ao ponto branco (ver Figura 1, itens C e D).



Figura 1: Instruções de uso.

- 3 - Para regular a pressão para uso, após sentar na almofada, abra a válvula girando-a suavemente no sentido horário (ver Figura 1, item B) para esvaziá-la lentamente, reduzindo a pressão até alcançar o ponto de conforto desejado. Recomenda-se que o tempo médio de esvaziamento até atingir o ponto de maior conforto tenha a duração de 4 a 6 segundos.
- 4 - Para aumentar a pressão de uso (inflar a almofada) repita as instruções 1, 2 e 3.
- 5 - Quando alcançar a posição de conforto desejada, feche a válvula, girando-a no sentido anti-horário, até que esteja alinhada com o ponto branco (ver Figura 1, item C). Isso garantirá que o ar não escape, mantendo a pressão adequada e corretamente distribuída na almofada.

## ADEVERTÊNCIAS

- 1 - É crucial seguir corretamente o procedimento de regulagem de pressão. A falha em executar as instruções 2 e 3 resulta no rompimento das células de ar, o que implica na perda da garantia do produto.
- 2 - Evite o uso da almofada em condições extremas de temperatura ou de raios UV.
- 3 - Não a exponha ao fogo e mantenha longe de objetos afiados ou pontiagudos.
- 4 - Lave a capa da almofada a mão. Utilize apenas detergente suave e mantenha a válvula completamente fechada durante todo o procedimento de lavagem.

5 - Coloque a capa na almofada apenas quando ambas estiverem secas.

6 - A almofada deve ser usada com a capa original.

## COLOCAÇÃO DA ALMOFADA

A almofada ergonômica Freedom possui um sistema altamente versátil de fixação, permitindo a sua aderência em qualquer superfície equipada com velcro loops. Na parte inferior da almofada, há uma tira horizontal de velcro loops (ver Figura 2). Nesta tira de velcro estão aderidas três unidades dupla face de velcro hooks, que se movimentam livremente ao longo da tira horizontal. Esta versatilidade permite a colocação da almofada em qualquer base com velcro, independente do orientação do mesmo.

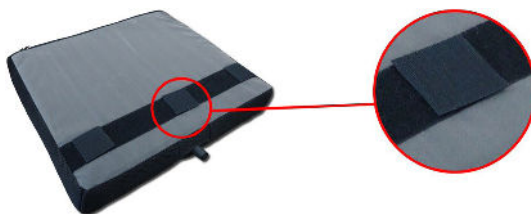


Figura 2: Vista da parte inferior da almofada e detalhe dos velcros.

A Figura 3 ilustra a colocação da almofada em dois tipos de base. Os itens E, F e G demonstram a colocação da almofada em uma base com o velcro posicionado verticalmente. Já os itens H, I e J mostram a almofada sendo colocada em um assento com velcro de posicionamento horizontal.



Figura 3: Colocação da almofada na base.

As três unidades de velcro hooks podem ser reguladas na tira horizontal da almofada conforme a necessidade, adaptando-se aos diversos tipos de base.

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## NORMAS DE GARANTIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO: Este termo de garantia é válido nos seus termos, desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização, pela empresa vendedora.
2. GARANTIA: pelo prazo de seis meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos "TERMOS DE GARANTIA".

## TERMOS DE GARANTIA

A FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA., como fabricante das Almofadas Ergonômicas Freedom, garante que estas são isentas de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso. A obrigação da FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período normal da garantia a que aludem estes termos, e cujo exame feito pela empresa fabricante ou autorizada pela mesma, revele satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pelo fabricante, sendo as despesas de fretes (revenda/fábrica), dentro do território nacional, por conta do fabricante, sendo de sua livre escolha o transportador.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

A almofada que tenha sido sujeita a uso inadequado, negligência ou acidente;

Uso incorreto com a almofada regulada na pressão máxima, causando o rompimento das células de ar (indicativo de bolhas de ar na capa);

A almofada que tenha sido reparada ou alterada fora do fabricante, de modo que, no julgamento do fabricante, seja afetado seu desempenho e segurança;

Deterioração normal de estofados e itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.

O fabricante, permanentemente empenhado com a melhoria da qualidade reserva-se o direito de modificar, sem prévio aviso, as especificações de seus produtos, bem como incluir ou excluir itens.

